





# Mask in Lab !

◀ 2 carrés de 21 \* 21 cm chacun : le carré clair (blanc ou taupe clair) est pour la face interne, le carré bleu est pour la face externe

## ETAPE 1 :

Posez le carré clair avec l'endroit vers vous (l'endroit est légèrement plus brillant, aspect satiné).  
Positionnez les liens aux 4 coins en les laissant dépasser de 0,5 cm. ATTENTION à placer les liens de manière à ne pas les coudre !

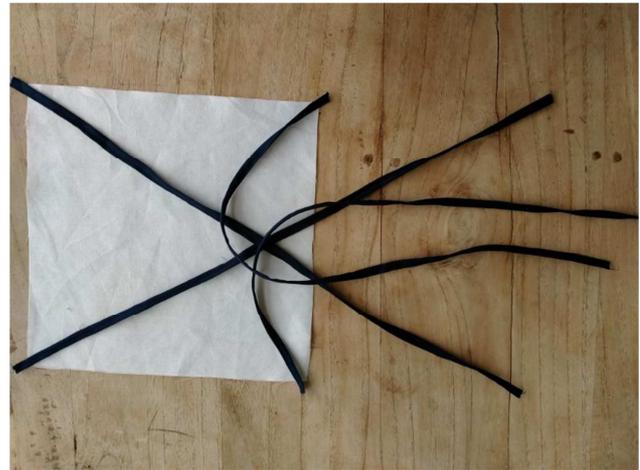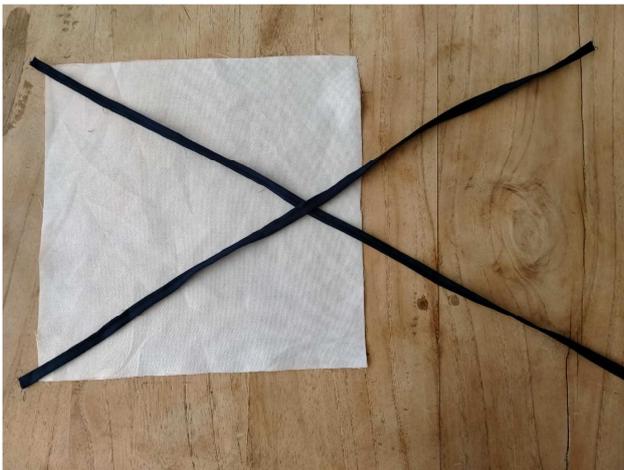


## ETAPE 2 :

Tracez sur le carré bleu une ligne tout autour à 0,5 cm du bord. ATTENTION à laisser 8 cm d'ouverture du côté des liens qui ressortent = bas du masque.  
Recouvrez votre montage avec le carré bleu (côté envers vers vous).  
Coudre sur la ligne tout autour, sauf l'ouverture.



### ETAPE 3 :

Coupez les 4 coins et dégarnir les coutures à 0,3 cm.  
Retournez le masque par l'ouverture en vous aidant des liens. ▶  
Aplatissez les coutures au fer à repasser.

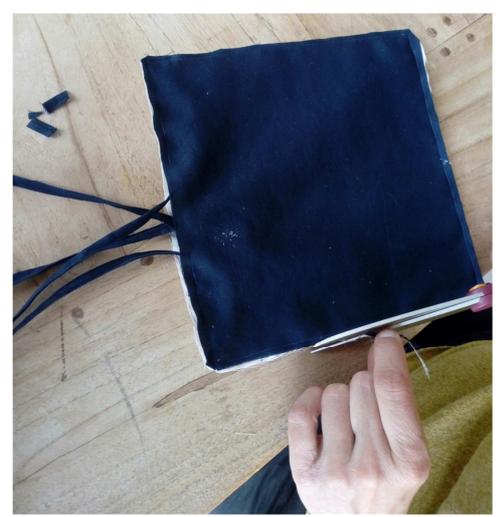

### ETAPE 4 :

Posez le montage avec l'ouverture vers le bas.  
Formez les plis en pinçant sur les 2 épaisseurs (au début des 3 cm) et en rabattant vers le bas (jusqu'au début des 1,5cm) (cf les dimensions sur la photo). Il y aura 3 plis au milieu avec 3,5cm en haut et 3,5 cm en bas.  
Coudre tout autour à 0,5cm.



**C'EST FINI !!!!!** les dimensions finales sont d'environ 20cm\*10cm

Extérieur du masque : les plis vont vers le bas  
Intérieur du masque : les plis vont vers le haut

